


取扱説明書


本品は組み立て済みですので、
すぐにお使い頂けます。

ご使用前は綿棒などで耳穴をきれいにしてください。


〈付属品〉

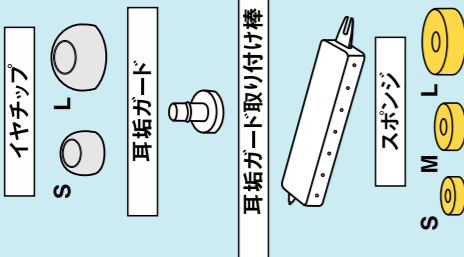

〈リモコン〉

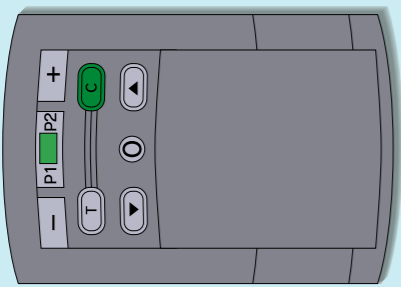


〈補聴器〉

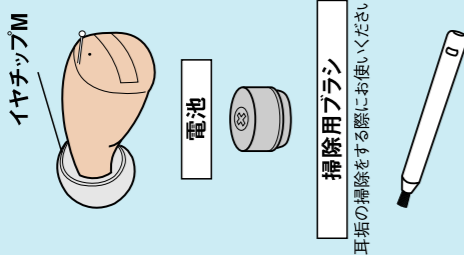

イヤチップ交換方法


使う方の耳穴の大きさに合わせてS、M、Lのサイズからお選びいただき、補聴器を耳穴にしっかりと装着してください。※出荷時にはサイズMが付いています。

- (1) イヤチップを図のようにそのままひっぱって取りはずします。

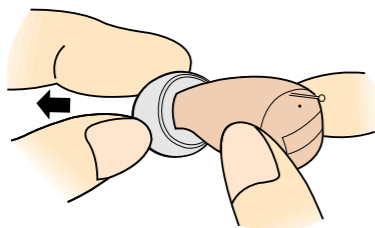


- (2) 新しいイヤチップの穴に本体の先端をしっかりとめ込みイヤチップを数回まわし、はずれないことを確認します。

→ 正しくイヤチップを取り付けられないでのご使用になると、耳の中にイヤチップが残ってしまうことがあります。このようなときにはご自身で取り出そうとはせず、耳鼻科医にご相談ください。

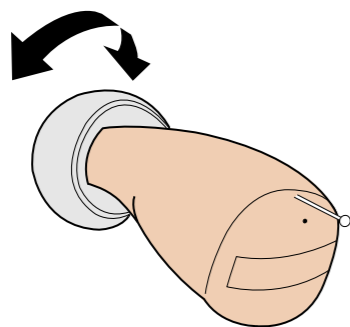


スポンジ耳せんのつけ方

装着した状態でピーピー音が止まらない場合

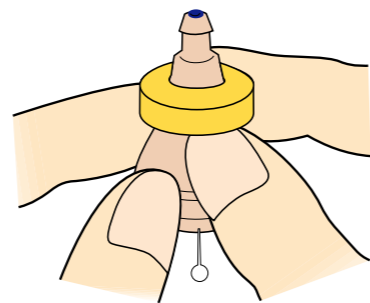

イヤチップを外し図のようにスポンジ耳栓を差込んで下さい。

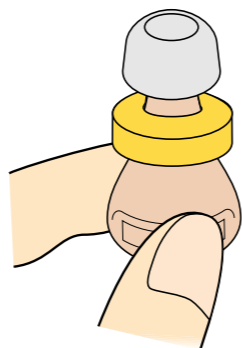


イヤチップを装着すれば出来上がりです。


電池を入れる

使用電池: 空気電池 <PR-536 (10)>
電池寿命: 連続使用で約60時間


- (1) 電池ホルダーを開き、電池の「+」面を上にして電池ホルダーに入れる。「+」面(シール側)が上になるように電池の向きを確かめてお入れください。

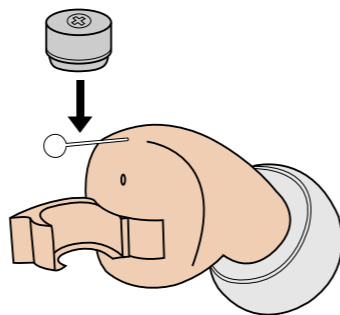

- (2) 電池ホルダーの開閉で電源の「入/切」をします。電池ホルダーを完全に閉めると電源が入ります。また、電池ホルダーを完全に開けると電源が切れます。

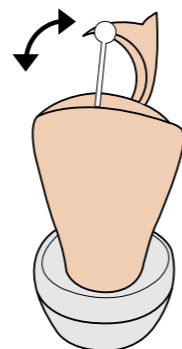

装着する

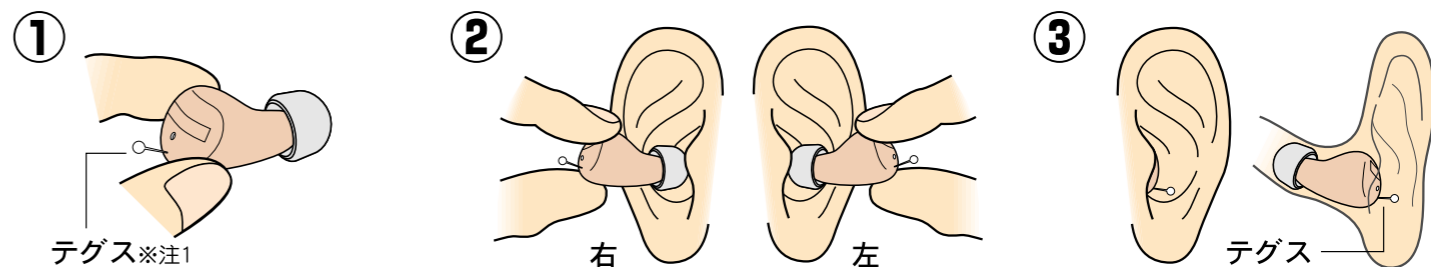

- ① 親指と人差し指で補聴器をつかみます。
- ② 補聴器のテグスが下側に来ている状態で、ゆっくりと補聴器の向きを調整しながら耳に入れてください。 ※注2
- ③ 耳に入りましたら手を離して下さい。ピーピー音がしなければ正しく装着されています。 ※注3

※注1 テグスはアンテナではありません。取り外しのツマミとしてご利用ください。
※注2 耳穴の形は、人によってそれぞれ異なり、テグスが下の状態の方が入れ易い場合があります。
※注3 持ったままですと、ピーピー音が止まらない場合があります。

取り出す

- (1) テグスをつまんで、耳から取り出す。補聴器本体を軽く引き出して取り出してください。
- (2) 保管する。電源が「切」の状態であることを確かめ、補聴器内部にゴミが入らないよう、補聴器ケースに入れて保管してください。

イヤチップのSサイズでも耳に入らない場合、イヤチップを外して耳に入れてください。ピーピー音が止まらない場合はご相談下さい。

リモコンの使い方

(リモコン付の場合)

リモコンでの操作は補聴器本体のスイッチがONの状態で行います。

電池切れお知らせランプ

赤色に変わったら電池交換の目安時期です。

環境切替ボタン

押すごとに静音モード→騒音モード→と切り替わります。

音量を大きくします

補聴器の電源を入れる

電源を入れる時だけリモコンを補聴器に1~2cm位まで近づけて下さい。

音量を小さくします


使用しません

低音を弱くします


補聴器の電源を切る

補聴器を長時間使用しない時は補聴器本体の電源をOFFして下さい。

通常リモコンは補聴器から約1mくらいまでは操作できます。

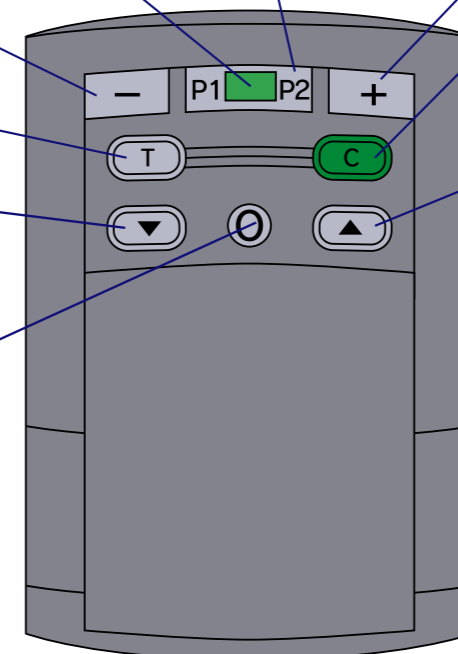

低音を強くします

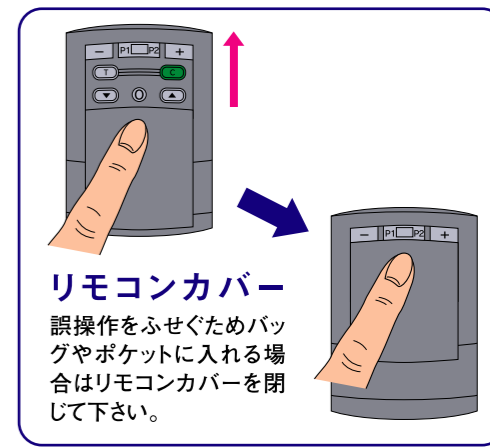

リモコンカバー

誤操作をふせぐためバッグやポケットに入れる場合はリモコンカバーを閉じて下さい。

